


M.E. Technica

Mi-3001 太田・藤本氏コンプリートCCCマーカ 5.6mm センターピン付

¥ 59,000

角膜上にマーキングしてCCCを行う際の目安とします。6.0mmのレンズに適しています。

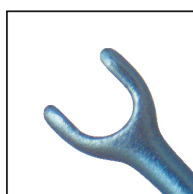

M.E. Technica

Mi-3002 鈴木氏Uフック

¥ 42,800

鈴木氏Uフックは、眼内レンズの支持部の処理や、小瞳孔眼で瞳孔を広げたい場合などに有用です。

- ① 眼内レンズのループやレンチスコンフォート*などの支持部が、水晶体嚢から脱出している時、Uフックを使用して脱出部をはさむようにして押し込む、あるいは、ひねるなどの操作をすると、安全に嚢内に押し込むことができます。
- ② 眼内レンズを摘出する場合は、Uフックでループや光学部の縁を挟みながら引くと、摘出しやすくなります。
- ③ 小瞳孔眼で瞳孔を広げたい時にもUフックは有用です。虹彩フック等で手前の虹彩縁を引っ張り、Uフックで対称側の虹彩縁をはさんで押すことで、容易に瞳孔を拡張することができます。虹彩拡張器等の使用頻度が減る効果もあります。





MOVIE



M.E. Technica

Mi-4001 日下氏インフュージョンカニューラ 23G 3.0mm 小児用 ￥19,800

未熟児網膜症手術など小児の硝子体手術用に開発された、縫着不要の自己保持型カニューラです。カニューラは眼内に2.0mm入った位置で固定されるため、カニューラ先端部の確認が容易です。白内障手術時の前房メインテナーとして使用することもできます。

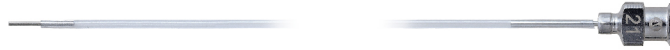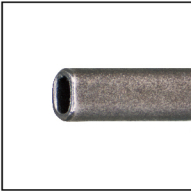

M.E. Technica

Mi-4002 西村・藤本氏前房メインテナー 0.95×0.55mm ￥21,800

薄く扁平に加工されたメインテナーは、自己閉鎖しやすく、20Gのサイドポートより容易に挿入できます。メインテナー全体がサンドブラスト加工されているため、挿入の深さに関係なく安定した留置が可能です。



M.E. Technica

Mi-4101 吸引チップ 直 0.3mm ポリッシャー付 20G ￥38,000

