



EP-2100 イアーポッパー ¥ 29,800 (税別)

イアーポッパーは、  
滲出性中耳炎の治療や耳管機能障害の予防のために開発された自己耳管通気装置です。

ボタンを押すだけの簡単な操作で、鼻腔より中耳に一定量の空気をコンスタントに送り、中耳内の気圧差を調整します。特別な練習も不要で人目を気にすることなく、スマートに耳管通気が行えます。



イアーポッパーは、以下のようなことが原因で起こる不快な耳痛に効果があります。

登山

スキューバダイビング

エレベーターでの昇降時

飛行機内での気圧の変化

イアーポッパーは、ボタンを押すだけの簡単な操作で、自己耳管通気を行うことができます。

## 使用方法

- ① 鼻腔にイアーポッパーのノーズチップを押し当て動作ボタンを押すと、鼻腔内に一定量の空気がコンスタントに送られます。最初はこの感覚に馴れてください。
- ② イアーポッパーのノーズチップを鼻腔に押し当て、もう片方の鼻腔を指で押さえて塞ぎます。動作ボタンを押すと鼻腔に空気が送られ、中耳内の気圧差を調整します。その際、唾か水を飲み込むと耳管が開き、イアーポッパーからの空気が耳管に入りやすくなります。
- ③ 反対側の鼻腔にノーズピースを当て同じ操作を繰り返します。症状に応じて、以上の操作を繰り返してください。



イアーポッパーは医療機器です。必ず医師の管理のもとでご使用ください。



**M-EP1010-1**  
交換用ノーズピース(TPV樹脂製)5個入 ¥3,000 (税別)

- ・ノーズピースは繰り返し使用することができます。使用後は中性洗剤を用いて温水で洗浄してください。
- ・アルコールで清拭した場合は劣化が進むことがあります。
- ・ノーズピースは滅菌できません。

## 仕様

セット構成：本体、ノーズピース 1個、携帯用ポーチ  
 材質： 本体 ABS樹脂 滅菌不可  
           ノーズピース TPV樹脂 滅菌不可  
 寸法： 53mm(W)×113mm(H)×32mm(L)  
 重量： 約125g(電池含む)  
 電源： 単4アルカリ電池×4本  
 クラス分類：一般医療機器 / クラス1  
 届出番号：13B2X00180000074  
 製造業者：サミットメディカル社(米国)

