

iCare EXPORTのインストール

はじめに

iCare EXPORTは各種アイケアで測定した眼圧データを管理するための専用ソフトウェアです。iCare Exportを利用するには、事前にソフトウェアをインストールし、必要に応じて言語設定をおこなってください。

iCare EXPORT の最低システム要件

- x86 または x64 1 GHz以上のPentiumプロセッサ
- 512 MBのRAM
- 512 MBのハードディスク空き容量
- USB 2.0 接続
- 800 x 600の解像度ディスプレイ、256 色
- DirectX 9互換グラフィックスカード
- NET Framework 4.6.1 以降
- OS : Windows 10 または Windows 11 ※MACではご利用できません

iCare EXPORTのインストール


1 iCare EXPORTのダウンロード

下記URLからソフトウェアをダウンロードします。

[Export - iCare \(icare-world.com\)](https://www.icare-world.com/export)

2 住居地の登録

お住いの国を選択し、
チェックボックスにチェックを入れて、
[**SUBMIT**] ボタンを選択します。
自動でソフトウェアがインストール
されます。

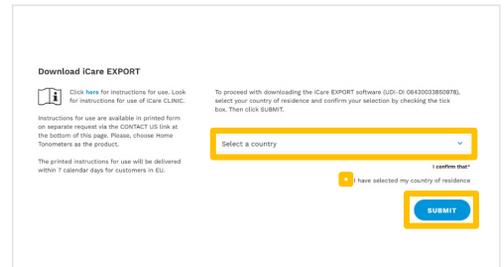

3 iCare EXPORTをインストール


1) ダウンロードした

[**iCare EXPORT 2.2.5 Setup**]
を開きます。


*バージョンは予告なしに変更になることが
ございます。




- 2) ウィザード画面を開いたら、
[**Next >**] を選択します。

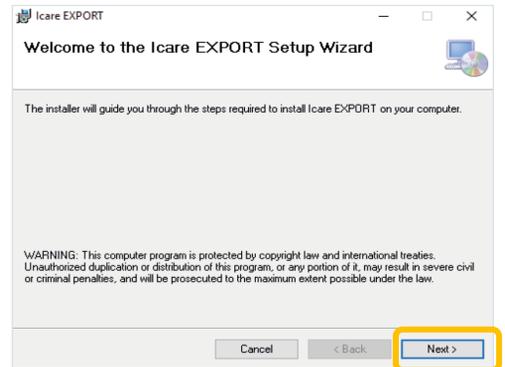

- 3) License Agreement画面にて
[**I Agree**] にチェックし、
[**Next >**] を選択します。

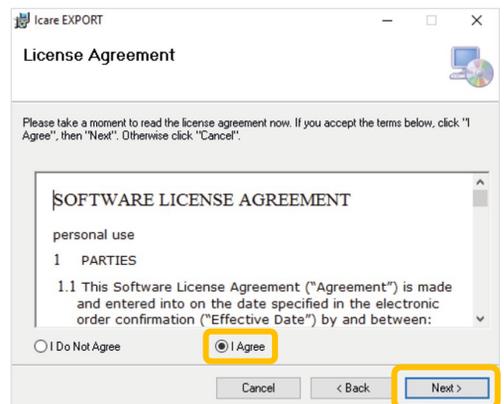


- 4) Select Installation Folder画面にて
[**Everyone**] にチェックし、
[**Next >**] を選択します。

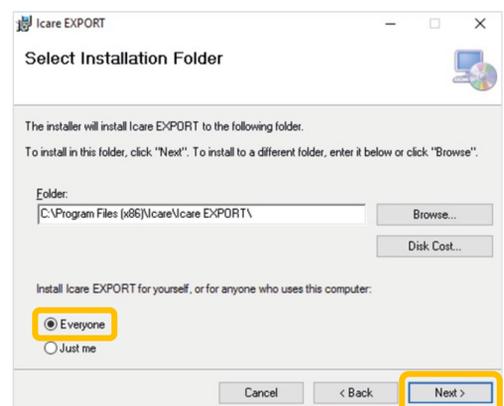


- 5) Mode Selectionの画面にて、
[● Cloud mode] にチェックし、
[Next >] を選択します。


* モードは後で変更可能です。

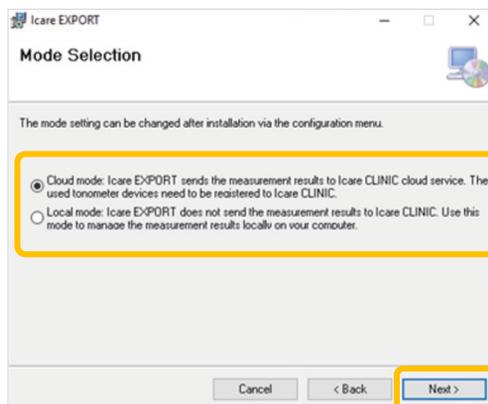

- 6) Confirm Installationの画面にて
[Next >] を選択します。

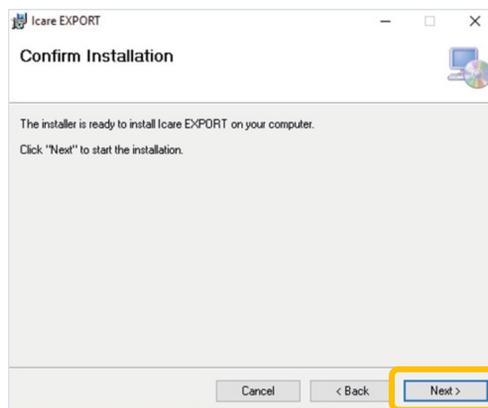

- 7) Installation Completeの画面にて
[Close] を選択します。

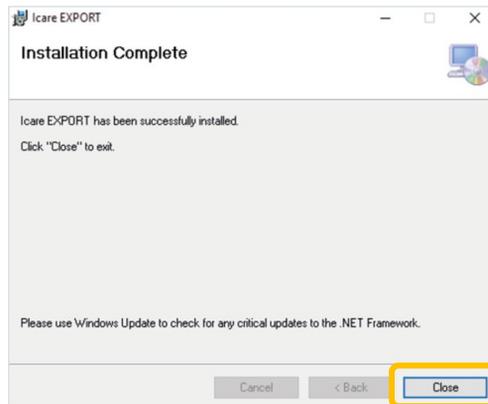

8) iCare EXPORTのインストールは完了です。

インストール後デスクトップにiCare EXPORTのショートカットアイコンが表示されます。



1 本体を接続

1) アイケアHOME/アイケアPROとPCをUSBケーブルで接続します。自動でiCare EXPORTが立ち上がります。

2) 画面右下の[≡]を選択し、**[ローカルモードで実行]**にチェックが入っているかご確認ください。

3) 測定結果が表示されたら、**[CSVで保存する]**または**[レポートの作成]**で測定データを保存します。
機器に保存されている測定履歴は**[デバイスのメモリを消去]**で削除できます。

