

ハッサンコーンの取付説明書 (Summit Medical社製)

ハッサンコーンは、Summit Medical社製『M-KIT-HC ハッサンコーン取付用 シリコンバーキット』を使用することで、同社製滅菌トレーの任意の場所に安全に収納することができます。

取付キットの内訳

- ・ IN-3951 ×2個
- ・ IN-6873 ×1個

※取付にはプラスドライバーをご用意ください。



IN-3951


IN-6873

取付に必要なスペース (目安)

縦×横：7穴 × 8穴分

取付方法

- 1 ハッサンコーンを置く場所を決め、必要なスペース (7穴 × 8穴) が確保できるか確認する。
- 2 IN-3951をベーストレーに 図a のようにセットする。
- 3 写真2の様にハッサンコーンを置き、しっかりと固定されていることを確認する。

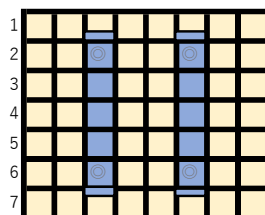

図a. IN-3951の取付位置



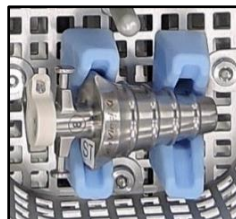


写真 2. ハッサンコーンの置き方

- 4 フタを閉めた時にハッサンコーンの真上に来るようにIN-6873を配置する。(図b)
- 5 フタ側のIN-6873がハッサンコーンを上から支え、しっかりと固定されるか確認する。(図c)

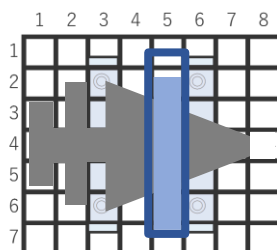


図b. 真上から見た図

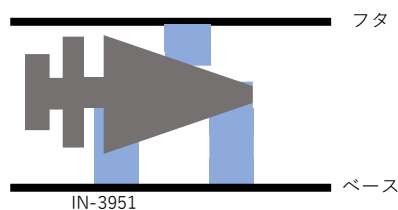

図c. 真横から見た図

注意

取付後、フタが完全に閉まらなかったり、ハッサンコーンとIN-6873との間隔が空きすぎている場合、IN-6873の位置を変え、最適な位置を見つける。

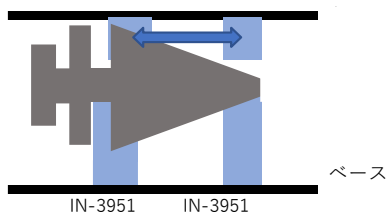

図d. IN-6873の位置

2020年7月現在

