

動物用 一般医療機器 眼科用囊内リング
AJL カプセルテンションリング

再使用禁止

【禁忌・禁止】

適用対象（動物）

- ・次の動物に使用しないこと
 1. 前囊切開（連続環状前囊切開）が不完全になった動物
 2. 水晶体囊の損傷がある場合（術中後囊破損を含む）
 3. 水晶体の成長が見込まれる動物
 4. 硝子体脱出等の重篤な術中の有害事象発生省令
- ・使用方法について
 1. 再使用禁止
 2. 再滅菌禁止


【形状・構造及び原理等】

構成

- ・カプセルテンションリングインjekター
- ・付属インjekター（オプション）

形状

代表品目：ACV001302PL

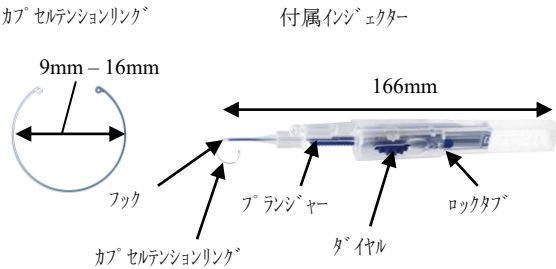

原理

水晶体囊に埋め込み、張力を生じさせて水晶体囊を伸ばす。

原材料

カプセルテンションリング：ポリメチルメタクリレート（PMMA）
付属インjekター（オプション）：ABS 樹脂、ポリプロピレン

製品番号	サイズ
ACV001302PL プリロード	13mm
ACV001602PL プリロード	16mm
ACV001102 CTR 単体	11mm
ACV001302 CTR 単体	13mm
ACV001502 CTR 単体	15mm

【使用目的又は効果】

白内障手術の際にチン小帯の脆弱、断裂が疑われる動物等に対し、水晶体囊の安定化を目的として使用する。

【使用方法等】

＜付属インjekター（リング装填済み）を使用する場合＞

1. 適切なモデル、サイズ、使用期限の表示を確認する。
2. 無菌状態でパッケージからインjekターを慎重に取り外す。
3. カプセルテンションリング（以降、リング）がインjekターに完全に挿入されるまで、ダイヤルを前方に回す。
4. 「カチッ」と音がするまでロックタブを中央に向かってスライドさせ、のロックを解除する。
5. インjekターの先端を、切開創を通じて水晶体囊に挿入する。
6. ダイヤルを後方に回して、ゆっくりリングを外す。（インjekターから完全に出されると、リングがフックから外れる。）
7. フックが引っ込むまでダイヤルを前方に回し、眼からインjekターを取り外す。

＜鑷子にて挿入する場合＞

1. 適切なモデル、サイズ、使用期限の表示を確認する。
2. 無菌状態で滅菌バッグを開け、容器を取り出す。
3. リングが静電気を帯びてパッケージの蓋に付く可能性があるため、開封前に容器を軽くたたく。
4. ラベル面が上になるように容器を持ち、容器を開ける。
5. リングを鑷子で破損しないよう、注意して把持し、表面に損傷等が無いか、顕微鏡下で確認する。
6. BSS（Balanced Salt Solution）ですすぎ静電気を取り除く。
7. リングを鑷子で挿入する。

【使用上の注意】

＜次の動物には慎重に適用すること＞

角膜内皮障害、緑内障、ぶどう膜炎、糖尿病網膜症、網膜剥離、先天性眼異常、脈絡膜出血、眼感染症、高眼圧、虹彩炎、角膜以上、重篤な術中の有害事象発症症例、その他理由により、獣医師が慎重適用と判断した場合。

＜重要な基本的注意＞

- (1) ぶどう膜炎や眼感染症の動物については、外科的侵襲を加えることで、ぶどう膜炎、眼感染症の悪化や新たな感染症を引き起こすおそれがあるため、予め炎症を鎮静化させた上で、カプセルテンションリング挿入術を行うこと。
- (2) 本品の挿入には高度な手術手技・技量が必要となる。本品の使用にあたっては、あらかじめ十分な手技を習熟すること。また、術後も対象動物を定期的に受診させ、経過を観察すること。
- (3) 手術に先立ち、本品の対象となる動物の飼主に、本品の使用に伴って予期される効果と有害事象等について十分に説明すること。
- (4) 同犬種であっても個体によって眼の直径が異なる場合があるため、サイズ選定時には実際の直径、眼の状態を考慮すること。
- (5) 開封前に使用期限について製品ラベル及び外箱の表示を確認すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

<不具合、有害事象>

カプセルテンションリング挿入に伴い、以下のような不具合・有害事象が発生することがある。その際、リング挿入中止や摘出・再挿入が必要になる他、場合によっては、失明または不可逆的な視力障害等の重篤な健康被害をきたすおそれがある。

不具合：異物付着、リング破損、脱臼、偏位、落下、変色等。

有害事項：チン小帯断裂の悪化、水晶体囊の硝子体への落下、網膜剥離、脈絡膜剥離、黄斑浮腫・変性、角膜浮腫、前房出欠、角膜炎、眼内炎、眼圧上昇、眼圧低下、後囊破損、緑内障、硝子体炎、硝子体脱出、眼瞼炎、虹彩炎、虹彩癒着、後発白内障、チン小帯断裂、網膜剥離、フィブリン析出、ぶどう膜炎、色視症、眼内レンズへの沈着、視神経萎縮、等

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・高温多湿や直射日光を避け、室温で保管すること。

<有効期限>

- ・使用期限は外箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社エムイーテクニカ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-34-4

TEL：03-5395-4588 FAX：03-5395-4866

製造業者：

AJL オフサルミック / AJL Ophthalmic S.A.

スペイン

取扱説明書を必ずご参照下さい。