

機械器具 36 医療用ピンセット  
管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット 16209002

## UNO 硝子体鉗子

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】


- ・ 本製品はディスプレイ製品につき再使用は絶対にしないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、ハンドル（販売名：UNO 硝子体チップ用ハンドル 製造販売届出番号：11B2X10068000048）と組み合わせて使用する。

本品は単回使用であり、再使用はできない。

形状(代表品目)

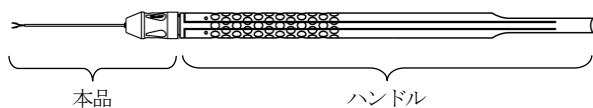

原理：ハンドルを掴まむと、その動きが接続部の軸に伝わり、この軸の動きに連動して先端部が閉方向に作動する。

原材料：ステンレススチール / ポリプロピレン他

#### 【使用目的又は効果】

医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いること。

#### 【使用方法等】

1. 使用前に、本製品の使用期限を確認する。使用期限が切れている場合には使用しないこと。
2. 使用前に、本製品の滅菌包装状態を確認する。包装に瑕疵があるなど汚染の疑いがある場合には使用しないこと。
3. 無菌環境下にて滅菌包装を開封し、本製品を取り出す。
4. ハンドル（販売名：UNO 硝子体チップ用ハンドル 製造販売届出番号：13B2X00180000065 以下同じ）の先端に本品を取り付ける。このとき、ハンドルと本品(チップ部)とが確実に結合され、ハンドルの操作とチップ部の動作とが正しく連動していることを確認すること。
5. ハンドルを掴まみ、眼組織・周辺組織の把持、操作、圧迫、引っ張り又は結合を行う。
6. 使用後はハンドルから本品を外し、感染防止に留意して適切に廃棄する。  
本品（チップ部）はディスプレイ製品につき再使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・ 包装材料に傷をつけたり、ピンホールを生じさせたりしないこと。
- ・ 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

使用期限

- ・ 使用期限は製品の包装箱を参照。〔自己認証による〕

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社エムイーテクニカ

〒335-0002 埼玉県蕨市塚越1-8-22

TEL: 048-420-9604 FAX: 0048-420-9606

製造業者：

ゴイダー/ Geuder AG

ドイツ