



スワール電解洗浄水100 取扱説明書

スワール電解洗浄水100は、独自の精製技術(PAT.3145347)により水のクラスター(分子集合体)を細分化し、汚れの微粒子への湿潤効果やタンパク質の溶解効果を高めた、電解アルカリイオン水100%の器具用洗浄水です。

■ 特徴

- ・高濃度の電解アルカリイオン水(pH12.5以上)が汚れの細部に浸透し、タンパク質や血液、ヒアルロン酸などの汚れを分解して浮き上がらせます。
- ・界面活性剤を一切使用していません。泡立ちもなく、すすぎも簡単です。
- ・化学物質を含んでいません。人体や環境への影響を最小限に抑えます。

■ 成分 電解アルカリイオン水 100%

■ 使用方法 器具の一次洗浄に用います。 ※希釈倍率を下げる事で洗浄効果は高まります。

◇浸漬洗浄・スワールマイクロ手術器具洗浄器

- ・20倍希釈にてご使用下さい。
- ・通常は10～15分を目安に、汚れが酷い場合は20分を目安に洗浄し、その後よくすすいで下さい。

◇スプレー(湿潤作用)

- ・原液にてご使用下さい。
- ・器具使用後すぐにミスト状にスプレーし、その後本洗浄を行って下さい。

◇その他

- ・VR-720SS 器具洗浄キット、及びシリンジを使用しての筒状器具や吸引式開瞼器内部の洗浄の際は20倍希釈にてご使用下さい。通水出来ない場合は原液に1日浸漬して下さい。
- ・手術ベッドや椅子、医療機器などに付着した汚れや雑菌の除去の際は原液にてご使用下さい。(2度拭き不要で消臭効果もあります)

■ 使用期限

- ・未開封 - 5年
- ・開封後 - 3年 ※空気に触れるとpHが下がるため、開封後は極力空気に触れないようにして下さい。

■ 使用上の注意

- ・乾燥し、こびりついてしまった汚れは完全に除去できない場合があります。
- ・器具の洗浄後は引き続き消毒・滅菌を行って下さい。
- ・アルミニウム製品には使用できません。腐食する可能性があります。
- ・水道水を使って希釈した場合、水道水に含まれるカルシウムが白い粉状として残留する事があるため、純水での希釈をお勧めいたします。
- ・目に入った場合はただちに洗い流して下さい。