



iCare IC200

200 degrees of positional freedom

アイケア IC200手持眼圧計

TA031

For better perception **icare**

# iCare IC200 tonometer

アイケア フィンランド社の特許技術

## リバウンドテクノロジー

アイケア IC200は、  
リバウンドテクノロジーを用いた  
"反跳式手持眼圧計"です。

極小のプローブを角膜に射出し、  
その跳ね返りの速度から眼圧を算出します。  
角膜への接触は一瞬で痛みも感じないため、  
麻酔薬は必要ありません。




## 自由な姿勢で測定

下方200°の範囲で眼圧測定が可能です。

座位や仰臥位、ベッドにもたれた姿勢にも対応します。

患者さんの姿勢を問わないため、臨床や外科、往診だけでなく救急現場などでも役立ちます。

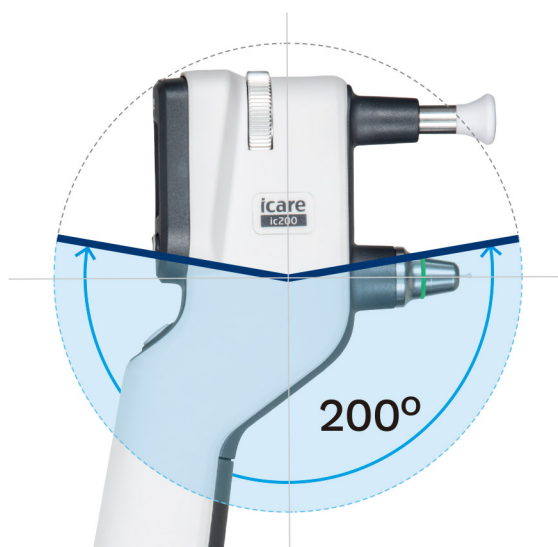


### 測定位置のサポート機能

視認性に優れたインジケーターが正しい測定位置を知らせます。



**赤色ライト**  
測定位置が正しくありません。

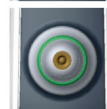

**緑色ライト**  
測定可能な位置です。



# 快適さを追求した機能

プローブの角膜への接触は一瞬で痛みもないため、  
麻酔薬は必要ありません。

本体にプローブを装填し測定ボタンを押すと、プローブが角膜に接触し眼圧を測定します。  
直感的なユーザーインターフェイスとガイド機能が、再現性の高い正確な測定結果をもたらします。  
測定に際して特別なスキルは必要ありません。  
ディスプレイとナビゲーションボタンは眼圧計の背面に配置され、測定中の操作・確認が容易です。

## 操作方法と主な特徴

測定ボタンを押して眼圧を測定します。この操作を6回繰り返して正確な眼圧値を得ます。  
測定ボタンの長押しにより6回連続の測定も可能です。



**iCare  
モードセレクト**

単回と連続の測定モード  
が選べます。



**iCare  
イージーナビ**

測定眼の選択や保存データの  
確認などが行えます。



**有機EL  
ディスプレイ**

操作ガイドや測定データ  
を鮮明に表示します。



**iCare  
イージーポジショニング**

正しい測定位置を赤と緑  
のLEDで知らせます。



ディスポーザブルプローブは個包装されています。感染症や微生物汚染の心配はありません。



極小のプローブ(1.7mm)は優しく角膜に接触します。痛みはなく、麻酔薬は不要です。



測定はわずか数秒で完了します。正確で再現性の高いデータが得られます。



患者さんの状態に合わせて、単回と連続の測定モードが選べます。



車椅子や眼裂の狭い患者さん、乳幼児や小児、外来や往診など人と場所を選びません。


# iCare CLINICで行う データ管理



iCare CLINIC<sup>※</sup>は、クラウド上で情報管理を行うソフトウェアです。  
アイケアIC200で測定したデータをクラウド上で管理や分析を行います。

測定データをiCare CLINICにアップロードするには、データ転送用ソフトのiCare EXPORTをPCにインストールする必要があります。IC200のデータはUSBケーブルを介して、PCよりiCare CLINICにアップロードされます。

※iCare CLINICは有料のサービスです。

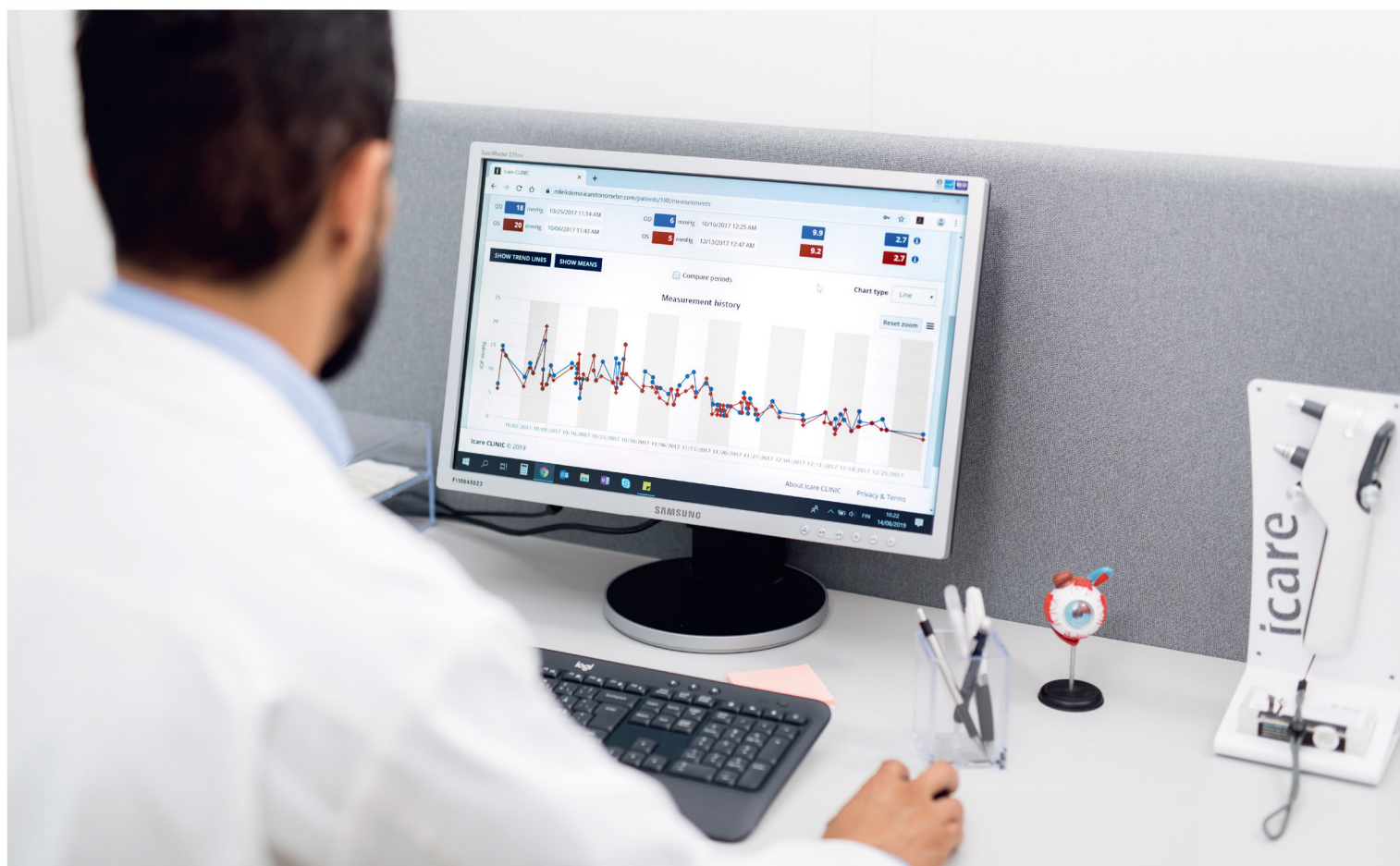



# iCare IC200 tonometer

## 仕様

アイケア IC200手持眼圧計		1,350,000円(税別)
製品番号	TA031	
測定範囲	7~50mmHg	
データ保存	100件	
寸法	43mm(W)×105mm(H)×214mm(D)	
重量	約260g(電池込み)	
電源	単3アルカリ電池 4本	
電撃に対する保護の形式	内部電源機器	
電撃に対する保護の程度	BF形装着部をもつ機器	
医療機器承認番号	231AKBZX00006000	
製造業者	アイケア フィンランド社(Icare Finland Oy)	

製品構成：アイケア IC200手持眼圧計本体、

ディスプレイプロブ(100本入)、プロブベース、単3アルカリ電池 4本、リストストラップ、シリコングリップカバー、操作ガイド、取扱説明書、USBメモリスティック内取扱説明書、保証書、キャリングケース

消耗品：TA031-1 ディスposableプロブ(100本入) 20,000円(税別)  
 TA031-6 ディスposableプロブ(600本入) 108,000円(税別)  
 TA031-2 プロブベース 13,000円(税別)

オプション：TA670 卓上・壁掛けスタンド アイケアIC200用 28,000円(税別)  
 アイケア IC200手持眼圧計専用のスタンドです。卓上・壁掛け、2通りのご使用ができます。  
 130mm(W)×295mm(H)×卓上：160mm/壁掛け：115mm(D)



## 緑内障治療は新しい時代へ

iCareは眼科診療において信頼できるパートナーになることを目指しています。

これまで、眼に関する診断や治療に貢献するために、使いやすさと正確性に優れた革新的な医療機器をドクターへ提供してきました。

これからもより多くのドクターや患者さんが、眼科医療をもっと身近に感じられる

未来を目指して、確かな製品の開発に取り組んでいきます。



株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4  
大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12  
札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2  
仙台 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-9-2-203  
名古屋 〒464-0858 名古屋市千種区千種1-10-20 101  
福岡 〒812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28

TEL 03-5395-4588 FAX 03-5395-4866  
TEL 06-6829-7912 FAX 06-6829-7922  
TEL 011-792-6522 FAX 011-792-6522  
TEL 022-739-7975 FAX 022-739-7976  
TEL 052-890-5565 FAX 052-890-5575  
TEL 092-432-3740 FAX 092-432-3741

[www.metecnica.co.jp](http://www.metecnica.co.jp)

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。

製造販売業許可番号：13B2X00180

202405-1-2500